

Instrukcja GameReady

1. **Napełnić zbiornik kostkami lodu i wodą** w odpowiednich ilościach zaznaczonych na zbiorniku,
2. **Dobrać odpowiedni mankiet** (włożyć mankiet wewnętrzny do zewnętrznego),
3. **Założyć mankiet** na odpowiednią część ciała,
4. Podłączyć **zasilanie**,
5. **Podłączyć mankiet** do konektora i urządzenia,
6. **Uruchomić urządzenie** (górny przycisk po lewej stronie wyświetlacza),
7. Wybrać parametry terapii:
 - **temperatura** (pokrętkiem po prawej stronie wyświetlacza),
 - **czas** (przyciskami poniżej wyświetlacza),
 - **kompresja** (przyciskiem po lewej stronie powyżej wyświetlacza),
8. Włączyć program (przycisk **PLAY**).

Po zakończonym zabiegu rozdzielić mankiety. Urządzenie z mankietami pozostawić do przesuszenia.

Kontakt do działu obsługi
Jakub Niemiec
698-608-016 lub 17-855-46-48

Konserwacja GameReady

System główny:

- Filtr znajdujący się w zbiorniku należy płukać w razie potrzeby i kontrolować jego zużycie, podczas ponownego założenia filtra wyczuwalne będzie zatrzaśnięcie w prowadnicach.
- Zewnętrzne powierzchnie i widoczne wewnętrzne powierzchnie urządzenia sterującego można czyścić miękką szmatką i łagodnym detergentem
- Przed umieszczeniem w torbie w celu przechowywania pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia

Mankiety:

Ostrożnie wyjąć wymiennik ciepła z rękawa. Umyć ręcznie wymiennik ciepła w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu lub mydła przeciwbakteryjnego. Nie używać płynów zmiękczających. Powiesić w celu wyschnięcia.

W razie potrzeby mankiet zewnętrzny można czyścić przecierając dostępnymi na rynku ściereczkami nie zawierającymi wybielacza lub prać ręcznie przy użyciu bardzo małej ilości łagodnego detergentu lub mydła przeciwbakteryjnego. Powiesić w celu wyschnięcia. **NIE PRAĆ W PRALCE.**

Kontakt do działu obsługi
Jakub Niemiec
698-608-016 lub 17-855-46-48