

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Środki ostrożności

W poniższych przypadkach wymagana jest szczególna ostrożność, a sposób użycia urządzenia może wymagać modyfikacji (np. zmiana końcówki, siły nacisku, pozycji ciała, unikanie bezpośredniego kontaktu z danym obszarem itp.). W razie wątpliwości lub jeśli masz jakiegokolwiek obaw, skonsultuj się z lekarzem.

- Nadciśnienie tętnicze (kontrolowane)
- Osteopenia
- Osteoporoza
- Cięża
- Cukrzyca
- Żylaki
- Wystające punkty kostne lub obszary
- Nieprawidłowe odczucia (np. drętwienie)
- Nadwrażliwość na nacisk
- Niedawny uraz lub operacja
- Skolioza lub deformacja kręgosłupa
- Leki mogące wpływać na odczuwanie bodźców

Przeciwwskazania

W poniższych przypadkach potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści. Zaleca się konsultację z lekarzem przed użyciem urządzenia.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowy stan zapalny, siniaki lub nowotwory
- Zakrzepica żył głębokich, zapalenie kości i szpiku
- Złamania kości lub kostniejące zapalenie mięśni
- Nadciśnienie tętnicze (niekontrolowane)
- Ostra lub zaawansowana choroba serca, wątroby lub nerek
- Choroby neurologiczne powodujące utratę lub zaburzenie czucia
- Bezpośrednie stosowanie na twarz, gardło lub okolice intymne
- Zaburzenia krzepnięcia krwi
- Niedawna operacja lub uraz
- Choroby tkanki łącznej
- Niewydolność lub choroby naczyń obwodowych
- Leki rozrzedzające krew lub wpływające na odczuwanie bodźców
- Bezpośredni nacisk na miejsce operacji lub implanty chirurgiczne
- Bezpośredni nacisk na oczy lub gardło

- Silny ból lub skrajny dyskomfort u użytkownika
- Zaawansowana skolioza lub poważna deformacja kręgosłupa
- Rozrusznik serca, kardiowerter-defibrylator (ICD) lub historia zatorowości

Uwagi dotyczące napraw

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie należy podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku usterki skontaktuj się oficjalnym dystrybutorem marki Therabody - firmą WERON.

Ryzyko związane z przegrzaniem urządzenia

Nie należy użytkować urządzenia przez dłuższy czas i bez przerwy, gdyż może to spowodować przegrzanie się urządzenia. W przypadku przegrzania natychmiast należy wyłączyć urządzenie i w razie jego ładowania odłączyć od zasilania.

Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego. Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ryzyko związane z bateriami

Użytkownik jest zobowiązany do:

- Ładowania urządzenia wyłącznie przy użyciu oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta.
- Unikania przeładowania urządzenia oraz dbałości o właściwą konserwację baterii.
- Regularnego monitorowania stanu baterii, aby uniknąć jej całkowitego wyczerpania, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z baterią, takich jak przegrzewanie się, wycieki lub uszkodzenia, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

Użytkowanie urządzenia przez dzieci

Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe nadzorowały jego użytkowanie.

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w technologię dostarczającą wibracje, terapię ciepłem, terapię zimnem, terapię LED i światłem podczerwonym, może stanowić to zagrożenie dla zdrowia dzieci, które nie są w stanie prawidłowo ocenić ryzyka lub stosować się do instrukcji użytkowania.

Ryzyko związane z przechowywaniem urządzenia

Urządzenie powinno być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać przechowywania urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia.

Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć i przechować w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu oraz innych elementów, które mogą uszkodzić jego funkcje.

Ryzyko związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia

Urządzenia z serii Wave należy czyścić wyłącznie magiczną gąbką (magic eraser) lub wilgotną ściereczką. Unikać stosowania środków czyszczących na bazie alkoholu.