

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność w poniższych przypadkach, a użycie odzieży może wymagać modyfikacji. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

- Niedawny uraz lub operacja
- Nadciśnienie (kontrolowane)
- Nietypowe odczucia, np. drętwienie
- Nadwrażliwość na ucisk
- Łagodna neuropatia obwodowa
- Odzież powinna przylegać ciasno, ale NIE może ograniczać krążenia
- Nie nosić tej odzieży w nocy podczas snu

Przeciwwskazania

W poniższych przypadkach potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści. Przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowy stan zapalny tkanek, infekcje, siniaki lub guzy
- Przepuklina dyskowa
- Złamania kości lub kostniejące zapalenie mięśni (myositis ossificans)
- Nadciśnienie (niekontrolowane)
- Choroby naczyniowe i krążeniowe, w tym zakrzepy krwi, zapalenie żył, zakrzepica, żylaki
- Ostre lub ciężkie choroby serca, wątroby lub nerek
- Ciężka neuropatia obwodowa lub inne przyczyny upośledzenia czucia
- Zaburzenia krzepnięcia krwi
- Choroby tkanki łącznej
- Przyjmowanie leków rozrzedzających krew lub wpływających na odczucia sensoryczne
- Bezpośredni nacisk na ranę pooperacyjną lub wszczepiony sprzęt medyczny
- Rozrusznik serca lub kardiowerter-defibrylator (ICD)
- Wszczepione urządzenia, takie jak wkładka wewnątrzmaciczna (IUD), metalowe śruby/płytki
- Historia zatorowości
- Alergia na materiał odzieży/rękawa
- Nie stosować w przypadku niewyjaśnionego bólu

Uwagi dotyczące napraw

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie należy podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku usterki skontaktuj się oficjalnym dystrybutorem marki Therabody - firmą WERON.

Ryzyko związane z przegrzaniem urządzenia

Nie należy użytkować urządzenia przez dłuższy czas i bez przerwy, gdyż może to spowodować przegrzanie się urządzenia. W przypadku przegrzania natychmiast należy wyłączyć urządzenie i w razie jego ładowania odłączyć od zasilania.

Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego. Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ryzyko związane z bateriami

Użytkownik jest zobowiązany do:

- Ładowania urządzenia wyłącznie przy użyciu oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta.
- Unikania przeładowania urządzenia oraz dbałości o właściwą konserwację baterii.
- Regularnego monitorowania stanu baterii, aby uniknąć jej całkowitego wyczerpania, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z baterią, takich jak przegrzewanie się, wycieki lub uszkodzenia, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

Użytkowanie urządzenia przez dzieci

Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe nadzorowały jego użytkowanie.

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w technologię dostarczającą wibracje, terapię ciepłem, terapię zimnem, terapię LED i światłem podczerwonym, może stanowić to zagrożenie dla

zdrowia dzieci, które nie są w stanie prawidłowo ocenić ryzyka lub stosować się do instrukcji użytkowania.

Ryzyko związane z przechowywaniem urządzenia

Urządzenie powinno być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać przechowywania urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia.

Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć i przechować w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu oraz innych elementów, które mogą uszkodzić jego funkcje.

Ryzyko związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia

Urządzenie NIE jest wodoodporne ani przeznaczone do prania w pralce. Nie należy dopuszczać do przedostania się nadmiaru płynów lub wody do urządzenia.

Przed czyszczeniem należy wyjąć baterię.

Aby wyczyścić, należy przetrzeć wewnętrzną powierzchnię paska wilgotną ściereczką z mikrofibry.