

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady użytkowania

- Tampony i sączi do nosa są produktami higienicznymi przeznaczonymi do jednorazowego użytku.
- Powinny być stosowane zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania.
- Przed każdym użyciem należy umyć ręce, aby uniknąć ryzyka infekcji.
- Nie należy używać produktu, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone lub jeśli minął termin ważności.

Przestrogi

- Należy stosować odpowiedni rozmiar tamponu lub sączi do nosa, aby zapobiec dyskomfortowi i możliwym powikłaniom.
- Nie należy pozostawiać tamponu w ciele dłużej niż zaleca producent, aby uniknąć ryzyka zespołu wstrząsu toksycznego (TSS).
- Sączi do nosa powinny być wymieniane regularnie, aby zapewnić skuteczne wchłanianie i uniknąć podrażnień błony śluzowej.
- W przypadku wystąpienia bólu, podrażnienia, zawrotów głowy lub innych niepokojących objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

- Tamponów nie powinny stosować osoby uczulone na ich składniki lub mające skłonność do infekcji intymnych.
- Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia nosa (np. zapalenie zatok) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem sączków do nosa.
- Nie stosować tamponów ani sączków do nosa w przypadku otwartych ran lub stanów zapalnych w miejscu aplikacji.

Przechowywanie

- Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte, aby zapobiec kontaktowi z zanieczyszczeniami i wilgocią.
- Nie przechowywać w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub wilgoci, co może wpłynąć na jakość produktu.

Dostępność dla dzieci

- Tampony i sączi do nosa powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.
- W przypadku połknięcia lub umieszczenia w drogach oddechowych należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.