

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Przenośne stoły do masażu Nubis są przeznaczone do użytku profesjonalnego oraz domowego, zapewniając stabilne i komfortowe podparcie podczas zabiegów manualnych. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Przed każdym użyciem sprawdzić stabilność stołu oraz stan mechanizmów blokujących.
- Upewnić się, że powierzchnia, na której stoi stół, jest równa i nieśliska.
- Maksymalne obciążenie stołu nie powinno być przekraczane – szczegóły dotyczące dopuszczalnej wagi znajdują się w instrukcji producenta.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny nóg, zawiasów oraz materiału obiciowego, aby uniknąć uszkodzeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie pozostawiać stołu w miejscach narażonych na ekstremalne temperatury lub wilgoć, co mogłoby wpłynąć na trwałość materiałów.
- W przypadku użytkowania przez osoby niepełnosprawne lub starsze, konieczna jest obecność osoby asekurującej.
- Składanie i rozkładanie stołu powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją, aby uniknąć przypadkowych przycięć palców lub uszkodzenia mechanizmów.
- Po zakończeniu użytkowania przechowywać stół w pozycji zabezpieczonej, aby uniknąć przypadkowego rozłożenia lub przewrócenia.

Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia powierzchni produktu użyj gąbki zwilżonej w roztworze wody z mydłem. Po wyczyszczeniu użyj suchej, czystej szmatki, aby przetrzeć powierzchnię.
- W razie potrzeby możesz użyć środka dezynfekującego z poniższej listy, pod warunkiem zastosowania zalecanego stężenia. Po wyczyszczeniu należy spłukać zastosowany środek.
- Przed zastosowaniem nowego środka dezynfekującego należy go wcześniej przetestować.
- Lista zatwierdzonych i niezatwierdzonych środków do czyszczenia i dezynfekcji pokrowca PU na stoły Nubis znajduje się w instrukcji stołu.

