

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Środki ostrożności

W tych przypadkach należy zachować szczególną ostrożność, a użytkowanie urządzenia może wymagać modyfikacji. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli obecnie masz lub podejrzewasz, że możesz mieć którykolwiek z poniższych stanów, lub jeśli masz jakiegokolwiek pytania.

- Niedawna kontuzja lub operacja
- Nadciśnienie (kontrolowane)
- Nienaturalne odczucia (np. drętwienie)
- Wrażliwość na nacisk lub wibracje
- Występowanie wypukłości kostnych lub innych wrażliwych obszarów
- Łagodna neuropatia obwodowa
- Zaleca się usunięcie soczewek kontaktowych przed użyciem urządzenia
- Urządzenie powinno dobrze przylegać, ale NIE powinno w żaden sposób ograniczać krążenia

Przeciwwskazania

Są to sytuacje, w których potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści. W związku z tym zaleca się, aby przed użyciem urządzenia skonsultować się z lekarzem.

- Wysypka skórna, rany otwarte, pęcherze, miejscowe zapalenie tkanek, infekcje, siniaki lub guzy
- Nadciśnienie (niekontrolowane)
- Choroby naczyniowe/tętnicze oraz krążeniowe, w tym zakrzepy, zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył i żylaki
- Ostra lub ciężka choroba serca, wątroby lub nerek
- Ciężka neuropatia obwodowa lub inne przyczyny upośledzenia czucia
- Zaburzenia krzepnięcia
- Choroby tkanki łącznej
- Leki, które mogą wpływać na krew lub zmieniać odczucia
- Bezpośredni nacisk na miejsce operacyjne lub elementy chirurgiczne
- Rozrusznik serca lub kardiowerter-defibrylator (ICD)
- Historia zatoru

Uwagi dotyczące napraw

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie należy podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ może to spowodować jego

uszkodzenie. W przypadku usterki skontaktuj się oficjalnym dystrybutorem marki Therabody - firmą WERON.

Ryzyko związane z przegrzaniem urządzenia

Nie należy użytkować urządzenia przez dłuższy czas i bez przerwy, gdyż może to spowodować przegrzanie się urządzenia. W przypadku przegrzania natychmiast należy wyłączyć urządzenie i w razie jego ładowania odłączyć od zasilania.

Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego. Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ryzyko związane z bateriami

Użytkownik jest zobowiązany do:

- Ładowania urządzenia wyłącznie przy użyciu oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta.
- Unikania przeładowania urządzenia oraz dbałości o właściwą konserwację baterii.
- Regularnego monitorowania stanu baterii, aby uniknąć jej całkowitego wyczerpania, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z baterią, takich jak przegrzewanie się, wycieki lub uszkodzenia, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

Użytkowanie urządzenia przez dzieci

Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe nadzorowały jego użytkowanie.

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w technologię dostarczającą wibracje, terapię ciepłem, terapię zimnem, terapię LED i światłem podczerwonym, może stanowić to zagrożenie dla zdrowia dzieci, które nie są w stanie prawidłowo ocenić ryzyka lub stosować się do instrukcji użytkowania.

Ryzyko związane z przechowywaniem urządzenia

Urządzenie powinno być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać przechowywania urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia.

Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć i przechować w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu oraz innych elementów, które mogą uszkodzić jego funkcje.

Ryzyko związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia

SleepMask i woreczek podróżny powinny zostać wyprane przed pierwszym użyciem. Aby zadbać o higienę, należy prać je co najmniej raz w tygodniu, podobnie jak pościel. Aby utrzymać maskę w dobrym stanie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia.

Wewnętrzna warstwa i woreczek podróżny:

- Ostrożnie należy wyjąć wewnętrzną warstwę ze SleepMask.
- Prać TYLKO wewnętrzną warstwę oraz woreczek podróżny w pralce, w zimnej wodzie, na delikatnym cyklu z użyciem łagodnego detergentu.
- Po zakończeniu cyklu prania należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na płaskiej powierzchni. Może to potrwać do 8 godzin.
- Przed ponownym złożeniem należy upewnić się, że elementy są całkowicie suche.
- NIE suszyć wewnętrznej warstwy ani woreczka podróżnego w suszarce – ciepło może uszkodzić tkaninę. NIE należy także wykręcać, nie skręcać ani nie ścisnąć materiału, aby go wysuszyć.

Zewnętrzna warstwa:

- Delikatnie zwilżyć nieścieralną, bezpyłową ściereczkę wodą lub roztworem na bazie alkoholu i delikatnie przetrzyć tkaninę.
- Osuszyć czystą, nieścieralną, bezpyłową ściereczką.
- Zewnętrzna warstwa SleepMask NIE jest wodoodporna, nie nadaje się do prania ręcznego ani w pralce.
- NIE dopuszczać do kontaktu urządzenia z nadmiarem płynów lub wody.