

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady użytkowania

- Urządzenie Ultrasix jest przeznaczone do stosowania w terapii ultradźwiękowej przez wykwalifikowany personel medyczny.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz przestrzegać zaleceń producenta.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób opisany w instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Nie stosować urządzenia w pobliżu wody ani w wilgotnym środowisku, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia bez upoważnienia producenta, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo oraz nie utracić gwarancji.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub samego urządzenia, należy natychmiast przerwać jego użytkowanie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Przestrogi

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny urządzenia oraz akcesoriów, takich jak głowice ultradźwiękowe.
- Unikać stosowania urządzenia na uszkodzonej skórze, otwartych ranach lub obszarach z infekcjami.
- Nie stosować urządzenia w miejscach o zmniejszonej wrażliwości na ból lub temperaturę, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń tkanek.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować ultradźwięków w przypadku:

- Ciąży
- Nowotworów (aktywne lub wyleczone w ciągu ostatnich 5 lat)
- Ostrego stanu zapalnego
- Zakrzepicy żył głębokich (ZŻG)
- Zaburzeń krzepnięcia krwi (np. hemofilia)
- Rozrusznika serca i innych implantowanych urządzeń elektronicznych
- Miejsc po radioterapii (w ciągu ostatnich 6 miesięcy)

- w okolicach mózgu, gałki ocznej, serca, narządów płciowych, chrząstki wzrostowej u dzieci
- Metalowych implantów w miejscu zabiegu (duże implanty)
- Zapalenia żył (thrombophlebitis)
- Ropnych stanów zapalnych skóry i tkanek miękkich
- Niewydolności serca, ciężkich chorób układu krążenia (nieuregulowane)

Należy skonsultować się ze specjalistą w przypadku:

- Menstruacji (przy zabiegach w okolicy miednicy)
- Blizn (świeżych)
- Wysokiej gorączki
- Miejscowych zaburzenia czucia
- Młodzieńczego zapalenia kości (choroba Osgooda-Schlattera) w ostrej fazie
- Podeszłego wieku
- Chorób skóry (np. egzema, łuszczyca) w miejscu zabiegu
- Zastosowania endoprotezy (w okolicy stawu)
- Cukrzycy (nieuregulowanej)
- Żylaków

Ważne:

- Przed każdym zabiegiem z wykorzystaniem ultradźwięków należy dokładnie omówić swój stan zdrowia z lekarzem lub fizjoterapeutą.
- Należy poinformować o wszystkich przyjmowanych lekach i chorobach przewlekłych.
- Decyzję o przeprowadzeniu zabiegu podejmuje lekarz lub fizjoterapeuta po uwzględnieniu wszystkich przeciwwskazań i oczekiwań pacjenta.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

- Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od źródła zasilania.
- Czyścić obudowę urządzenia miękką, wilgotną ściereczką. Unikać stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Głowice ultradźwiękowe należy czyścić zgodnie z zaleceniami producenta, używając odpowiednich środków dezynfekujących.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny urządzenia oraz akcesoriów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.

Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego.

Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.