

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady stosowania

- Kompres żelowy chłodząco-grzejący jest przeznaczony do terapii ciepłem i zimnem w celu łagodzenia bólu, obrzęków oraz stanów zapalnych wynikających z urazów.
- Może być stosowany zarówno na zimno (po schłodzeniu w lodówce lub zamrażarce), jak i na ciepło (po podgrzaniu w wodzie lub kuchence mikrofalowej).
- Produkt należy stosować zgodnie z instrukcją użytkowania, nie przekraczając zalecanego czasu aplikacji (zwykle 15-20 minut).
- Kompres powinien być zawsze owinięty w tkaninę lub ręcznik przed nałożeniem na skórę, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu, który może prowadzić do odmrożeń lub oparzeń.

Środki ostrożności

- Nie stosować na otwarte rany, uszkodzoną skórę lub w przypadku zaburzeń czucia (np. neuropatii cukrzycowej).
- Nie podgrzewać produktu dłużej niż zalecany czas, aby uniknąć przegrzania i pęknięcia opakowania.
- Przed podgrzewaniem w kuchence mikrofalowej upewnić się, że produkt jest zanurzony w wodzie (jeśli zaleca to producent), aby uniknąć nierównomiernego nagrzania.
- Nie stosować u niemowląt i małych dzieci bez konsultacji z lekarzem.
- W przypadku nadmiernego zaczerwienienia, bólu lub reakcji alergicznej przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Przeciwwskazania

- Nie stosować u osób z zaburzeniami krążenia (np. choroba Raynauda, zakrzepica).
- Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na zmiany temperatury.
- Unikać stosowania w przypadku niektórych schorzeń skóry (np. egzemy, oparzeń słonecznych).
- Kobiety w ciąży i osoby z chorobami przewlekłymi powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem.

Przechowywanie produktu

- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie przechowywać w zamrażarce dłużej niż zalecany czas, aby zapobiec nadmiernemu stwardnieniu żelu.
- Nie przekłuwać, nie rozcinać ani nie spożywać zawartości kompresu.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub połknięciu.