

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady użytkowania

- Urządzenie LaserSix HPP jest przenośnym laserem diodowym, przeznaczonym do terapii laserowej.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
- **Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny**
- Należy stosować się do zaleceń dotyczących parametrów terapii, takich jak moc, tryb pracy (ciągły lub pulsacyjny) oraz czas trwania zabiegu.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Nigdy nie kieruj wiązki laserowej bezpośrednio na oczy ani nie patrz bezpośrednio na emitowaną wiązkę, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Upewnij się, że zarówno operator, jak i pacjent noszą odpowiednie okulary ochronne podczas zabiegu, aby zapobiec uszkodzeniom wzroku.
- Unikaj stosowania lasera w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w środowiskach o podwyższonym ryzyku pożaru.

Przestrogi

- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny urządzenia, w tym okablowanie i akcesoria, aby upewnić się, że są one wolne od uszkodzeń.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w jego działaniu.
- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować laseroterapii w przypadku:

- ciąży i podczas karmienia piersią
- aktywnych infekcji bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych w miejscu zabiegu
- nowotworów skóry (aktywnych lub w remisji)
- świeżej opalenizny (słonecznej lub solarium)
- stosowaniu leków fotouczulających (niektóre leki, np. antybiotyki, retinoidy, leki przeciwdepresyjne, zioła dziurawca, zwiększają wrażliwość skóry na światło)

- fotodermatozy (choroby skóry wywołanej przez światło)
- nieuregulowanej cukrzycy
- skłonności do powstawania bliznowców (keloidów)
- epilepsji
- świeżych zabiegów chirurgicznych w obrębie zabiegu
- zaburzeń krzepnięcia krwi
- niektórych chorób autoimmunologicznych (np. twardzina skóry)

Należy skonsultować się ze specjalistą w przypadku:

- aktywnych zmian trądzikowych w miejscu zabiegu
- opryszczki w fazie aktywnej
- bielactwa
- stosowania kremów z retinolem (retinoidami)
- przyjmowania niektórych ziół (np. dziurawca)
- blizn
- ciemnej karnacji skóry (typ skóry IV-VI wg Fitzpatricka)
- chorób psychicznych

Ważne:

- Przed każdym zabiegiem laseroterapii należy dokładnie omówić swój stan zdrowia z lekarzem lub kosmetologiem.
- Należy poinformować o wszystkich przyjmowanych lekach i chorobach przewlekłych.
- Decyzję o przeprowadzeniu zabiegu podejmuje lekarz lub kosmetolog po uwzględnieniu wszystkich przeciwwskazań i oczekiwań pacjenta.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone i odłączone od źródła zasilania.
- Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia i, w razie potrzeby, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu przeprowadzenia konserwacji lub naprawy.

Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego.

Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.